

siegmond.

Air QUEEN Breeze Mask



FFP2 Maske für Gesundheits- und Arbeitsschutz (Schutz vor Partikeln)

Noch einmal verbesserte Qualität & vom TÜV Rheinland zertifiziert (CE1008)

- **Atenschutzmaske mit CE-Kennzeichnung des TÜV Rheinlands**
- **Typ: FFP2 NR (nicht wiederverwendbar)**
- **erfüllt den Prüfstandard EN149:2001+A1:2009 der Schutzklasse FFP2 (PSA = persönliche Schutzausrüstung)**
- **feiner Nanofaser-Filter mit hoher Filterleistung**
- **Extrem leichtes Gewicht (nur 4,38 g)**
- **bestens für Brillenträger/innen geeignet, vermindert das Beschlagen**
- hoher Tragekomfort, liegt perfekt am Gesicht an
- hygienische, staubsichere Einzelverpackung
- bietet sowohl Fremd- als auch Eigenschutz
- die ergonomische Passform mit einstellbarem Nasenbügel und Ohrschlaufen oder alternativ durch
- beiliegendem Clip mit Kopfschleife gewähren hohen Tragekomfort den ganzen Tag
- Latexfrei und frei von anderen Allergenen
- Geprüft nach für Masken relevanten Parametern des OEKO-TEX® STANDARD 100



EU- Konformitätserklärung / Zertifikate / Produktinformationen

<https://www.siegmond.care/Downloads>

DE Gebrauchsanleitung

1. Reinigen oder desinfizieren Sie Ihre Hände vor dem Öffnen der Verpackung.
2. Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Unversehrtheit der Maske.
3. Falten Sie die Maske auf und formen Sie den Nasenbügel etwas vor.
4. Setzen Sie die Maske auf Ihr Gesicht, legen Sie die Ohrschlaufen um die Ohren und achten Sie darauf, dass sich der Nasenbügel oben befindet.
5. Fahren Sie mit Ihren Fingern von der Mitte des Nasenbügels entlang nach außen bis der Nasenbügel vollständig am Gesicht anliegt.
6. Decken Sie die Maske mit beiden Händen ab und atmen Sie stoßartig aus, um sicherzustellen, dass die Maske dicht ist.
7. Wenn Luft oben oder seitlich aus der Maske austritt, passen Sie den Nasenbügel oder die Position der Maske im Gesicht an und testen danach erneut.

DE Warnhinweise

1. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu falschem Gebrauch der PSA und somit zu Erkrankung und Tod führen.
2. Falls die Maske nicht richtig sitzt, betreten Sie keine Räume mit potenziellem Risiko.
3. Wechseln Sie die Maske, wenn diese beschädigt ist oder der Atemwiderstand zu hoch ist.
4. FFP Masken schützen nicht vor Gasen und Dämpfen.
5. Nicht verwenden in Umgebungen mit weniger als 19,5% Sauerstoff oder Explosionsgefahr oder wenn die Schadstoffkonzentrationen gesundheitsgefährlich sind.
6. Barthaare und Atemwegserkrankungen können die Wirksamkeit der Maske verringern.
7. Die Maske auf keinen Fall verändern oder manipulieren.
8. Einmalgebrauch (max. 8h).
9. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort, falls Sie sich unwohl fühlen.
10. Zur Festlegung der benötigten Schutzklasse konsultieren Sie einen Experten für Hygiene oder Berufsschutz.

Produktinformationen

Produktname	FFP2 Atemschutzmaske
Modell	Air Queen Breeze Mask
Artikelnummer	4000
Verordnung	Verordnung (EU) 2016/ 425 www.eur-lex.europa.eu
Prüfnorm	EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
Benannte Stelle	TÜV Rheinland InterCert Muszaki Felügyeleti és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság Gizella út 51-57. H-1143 Budapest, Country : Hungary; NB: 1008
Import in die EU & Vertrieb	Siegmund Care GmbH Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen, Deutschland Telefon: 0 82 31 / 99 19 20 – 0 Internet: www.siegmund.care
Hersteller	TOPTEC Co., Ltd. 122, Asanvalley-ro, Dunpo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
PZN (deutsche Apothekennummer)	17931524 (1 Stück)

Technische Daten:	
Material	1. Außenschicht: Polypropylen-Spinnvlies 2. Filter (Nanofaser): 98.4% PET +1.6% PVDF 3. Innenschicht: Polypropylen-Spinnvlies Nasenbügel: Polypropylen-beschichteter Draht Ohrschlaufen: 80% Nylon 20% Elasthan Kopfclip: Polypropylen
Anzahl der Schichten	3
Tragedauer	Nicht wiederverwendbar / max. eine Schicht (8 Stunden)
Weitere Produktmerkmale	Latexfrei, Colophoniumfrei, Nickelfrei
Maße	Breite 210mm; Höhe 76 mm
Gewicht	4,38 g
Mindesthaltbarkeit	3 Jahre nach Produktionsdatum, siehe Verpackung
Lagerung	Temperaturbereich -20°C bis +30°C; vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen



EU- Konformitätserklärung / Zertifikate / Produktinformationen

<https://www.siegmund.care/Downloads>

Symbole / Symbols / Symboles/ Simboli

	Herstellungsdatum / Date of production / Date de production / Data di produzione		Chargennummer / Lot number / Numéro de lot / Numero di lotto
	Verwendbar bis / usable until / utilisable jusqu'à		Temperaturbereich der Lagerung / Temperature range of storage / Plage de température de stockage / Intervallo di temperatura di stoccaggio
	Warnhinweise beachten / Observe warnings / Respecter les avertissements / Attenzione agli avvertimenti		Recycling Code / Code Rycycling / Codice Rycycling 21 = Pappe / Paper / Carton / Cartone 05 = Polypropylen
	Gebrauchsanweisung beachten / Follow the instructions for use / Consulter le mode d'emploi / Seguire le istruzioni per l'uso		Vor Feuchtigkeit schützen / Protect from humidity / Protéger contre l'humidité / Proteggere dall'umidità
	Einwegprodukt / Disposable product / Produit à usage unique / Prodotto usa e getta		Vor Lichteinstrahlung schützen / Protect from light exposure / Protéger de l'exposition à la lumière / Proteggere dalla luce
	Latex-frei / Latex free / Sans Lexique / Senza lattice		