



FFP2 Maske für Gesundheits- und Arbeitsschutz (Schutz vor Partikeln)

- **Stiftung Warentest – Testsieger, Empfehlung und Preistipp (test 11/2022, FFP2-Masken)**
- **Typ: FFP2 NR (nicht wiederverwendbar)**
- **erfüllt den Prüfstandard EN149:2001+A1:2009 der Schutzklasse FFP2 (PSA = persönliche Schutzausrüstung)**
- hohe Filterleistung verbunden mit hohem Tragekomfort
- hygienische, staubsichere Einzelverpackung
- bietet sowohl Fremd- als auch Eigenschutz
- die Kopfschlaufen sind für den stundenlangen professionellen Einsatz (bei Trageweise mit beiliegendem Clip)
- Latexfrei und frei von anderen Allergenen
- Geprüft nach für Masken relevanten Parametern des OEKO-TEX® STANDARD 100



EU- Konformitätserklärung / Zertifikate / Produktinformationen

<https://www.siegmund.care/Downloads>

DE Gebrauchsanleitung

1. Falten Sie die Maske auf und halten Sie an den Ohrschlaufen.
2. Setzen Sie die Maske auf Ihr Gesicht, legen Sie die Ohrschlaufen um die Ohren und achten Sie darauf, dass sich der Nasenbügel oben befindet.
3. Fahren Sie mit Ihren Fingern von der Mitte des Nasenbügels entlang nach außen bis der Nasenbügel vollständig am Gesicht anliegt.
4. Decken Sie die Maske mit beiden Händen ab und atmen Sie stoßartig aus, um sicherzustellen, dass die Maske dicht ist.
5. Wenn Luft oben oder seitlich aus der Maske austritt, passen Sie den Nasenbügel oder die Position der Maske im Gesicht an und testen danach erneut.

DE Warnhinweise

1. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu falschem Gebrauch der PSA und somit zu Erkrankung und Tod führen.
2. Falls die Maske nicht richtig sitzt, betreten Sie keine Räume mit potenziellem Risiko.
3. Wechseln Sie die Maske, wenn diese beschädigt ist oder der Atemwiderstand zu hoch ist.
4. FFP Masken schützen nicht vor Gasen und Dämpfen.
5. Nicht verwenden in Umgebungen mit weniger als 19,5% Sauerstoff oder Explosionsgefahr oder wenn die Schadstoffkonzentrationen gesundheitsgefährlich sind.
6. Barthaare und Atemwegserkrankungen können die Wirksamkeit der Maske verringern.
7. Die Maske auf keinen Fall verändern oder manipulieren.
8. Einmalgebrauch (max. 8h).
9. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort, falls Sie sich unwohl fühlen.
10. Zur Festlegung der benötigten Schutzklasse konsultieren Sie einen Experten für Hygiene oder Berufsschutz.

Produktinformationen

| | |
|--|--|
| Produktname | FFP2 Atemschutzmaske |
| Modell | JIFA - JFM02 |
| Artikelnummer | 3190 |
| Verordnung | Verordnung (EU) 2016/425 www.eur-lex.europa.eu |
| Prüfnorm | EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR |
| Benannte Stelle | CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 015 AKK1 Ireland www.cqgs.co.uk |
| Import in die EU & Vertrieb | Siegmund Care GmbH Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen, Deutschland Telefon: 0 82 31 / 99 19 20 - 0 Internet: www.siegmund.care |
| Hersteller | Jiangnan Development Area, Dongyang, Zhejiang, P.R.China 322121 China |
| PZN (deutsche Apothekenummer) | 17153469 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Technische Daten: | |
| Material | 61,5% Spin-Vliesstoff + 38,5 Meltblown Vlies |
| Anzahl der Schichten | 3 |
| Tragedauer | Nicht wiederverwendbar / max. eine Schicht (8 Stunden) |
| Weitere Produktmerkmale | Latexfrei, Colophoniumfrei, Nickelfrei |
| Maße | Breite 108 mm (gefaltet und ohne Band); Höhe 160 mm |
| Gewicht | 5,13 g |
| Mindesthaltbarkeit | 3 Jahre nach Produktionsdatum, siehe Verpackung |
| Lagerung | Temperaturbereich -20°C bis +40°C; vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kommerzielle Daten: | |
| PZN (deutsche Apothekenummer) | 17153469 |
| GTIN | 4260698610028 - Packung (20 Stück) 4260698610608 - Karton (1.080 Stück) |
| HS-Code (Zolltarifnummer) | 6307909811 |



EU- Konformitätserklärung / Zertifikate / Produktinformationen

<https://www.siegmund.care/Downloads>

Symbole / Symbols / Symboles/ Simboli

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Herstellungsdatum / Date of production / Date de production / Data di produzione | | Chargennummer / Lot number / Numéro de lot / Numero di lotto |
| | Warnhinweise beachten / Observe warnings / Respecter les avertissements / Attenzione agli avvertimenti | | Temperaturbereich der Lagerung / Temperature range of storage / Plage de température de stockage / Intervallo di temperatura di stoccaggio |
| | Gebrauchsanweisung beachten / Follow the instructions for use / Consulter le mode d'emploi / Seguire le istruzioni per l'uso | | Recycling Code / Code Rycycling / Codice Rycycling 21 = Pappe / Paper / Carton / Cartone 05 = Polypropylen |
| | Einwegprodukt / Disposable product / Produit à usage unique / Prodotto usa e getta | | Vor Feuchtigkeit schützen / Protect from humidity / Protéger contre l'humidité / Proteggere dall'umidità |
| | Latex-frei / Latex free / Sans Lattex / Senza lattice | | Vor Lichteinstrahlung schützen / Protect from light exposure / Protéger de l'exposition à la lumière / Proteggere dalla luce |