


## Atemschutzmaske KN 95 Respirator KN 95

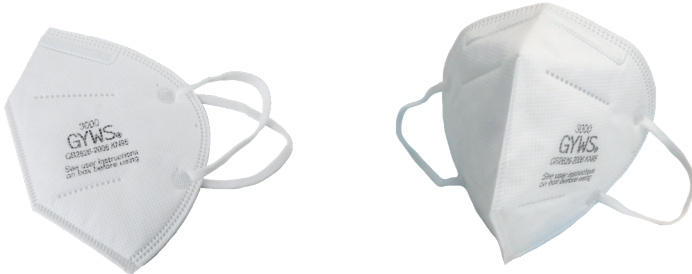

**1**  
**Greifen Sie die Maske an den Schlaufen und setzen Sie den unteren Teil am Kinn an.**

Grab the mask by the loops and place the lower part on the chin.



**2**  
**Legen Sie sich jeweils eine Schlaufe um eines Ihrer Ohren.**

Put a loop around each of your ears.



**3**  
**Passen Sie den Draht an die Nasenbrücke an, indem Sie ihn andrücken. Die Maske sollte so positioniert werden, dass sie dicht sitzt.**

Fit the wire to the nose bridge by pressing it on. The mask should be positioned so that it fits tightly.