

Atemschutzmaske KN95 JIFA Respirator KN95 JIFA



1

Greifen Sie die Maske an den Schlaufen und setzen Sie den unteren Teil am Kinn an.

Grab the mask by the loops and place the lower part on the chin.



2

Legen Sie sich jeweils eine Schlaufe um eines Ihrer Ohren.

Put a loop around each of your ears.



3

Passen Sie den Draht an die Nasenbrücke an, indem Sie ihn andrücken. Die Maske sollte so positioniert werden, dass sie dicht sitzt.

Fit the wire to the nose bridge by pressing it on. The mask should be positioned so that it fits tightly.