


## Mund- und Nasenmaske Mouth and nose mask

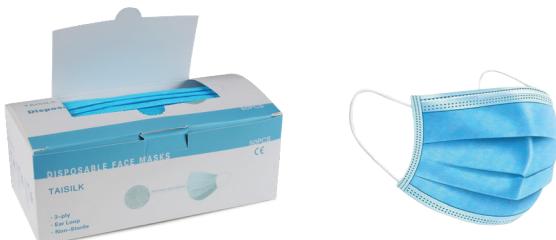

**1**

**Bedecken Sie Mund und Nase und hängen Sie die Ohrriemen beider Seiten der Maske an die Ohren.**

**Cover the mouth and nose and hang the ear straps of both sides of the mask on ears.**



**2**

**Passen Sie den Draht an die Nasenbrücke an, damit die Mund- und Nasenmaske dicht anliegt.**

**Fix the wire according to the shape of the nose bridge to prevent air from entering.**



**3**

**Bitte ziehen Sie die Maske nach unten zum Unterkiefer, um einen dreidimensionalen Atemraum zu erzeugen. Prüfen Sie, ob beim Einatmen die Maske richtig sitzt und justieren Sie bei Bedarf nach.**

**Please pull the mask down to the lower jaw to present the three-dimensional breathing space instantly.**